

Manual de instrucciones

AD540 – AD541



DIETZ[®]
REHA-PRODUKTE
Descostrasse 10 D-76307
Karlsbad-Ittersbach
Tel. +49 (0) 7248/ 9186 -0
Fax. +49 (0) 7248/ 9186 -86



Informaciones generales

Para el taburete de baño Milano y la banqueta giratoria Turín la empresa Dietz declara su responsabilidad única de acuerdo con la directiva 93/42 CE para productos sanitarios.

Nos reservamos el derecho de cambios sin previo aviso sobre el diseño presentado en este manual debidos a desarrollos técnicos.

Indicaciones y finalidades

El taburete de baño y la banqueta giratoria sirve como asiento para la ducha para personas con dificultades para estar de pie. En el caso de la banqueta giratoria lleva un asiento suave giratorio proporciona confort cuando se está sentado como también para girar cuando esté en la ducha.

Advertencias de seguridad / Utilización

- El taburete de baño debe apoyarse de forma segura en las 4 patas. Existe el peligro de resbalar al sentarse o levantarse en duchas húmedas, especialmente cuando utilice jabón.
- Después de cada montaje y desmontaje del taburete controle la estabilidad y compruebe que todas las patas están reguladas a la misma altura.
- No se incline demasiado hacia delante o hacia atrás. Peligro de caída!
- Asegúrese después de cada uso, que el taburete está fijo y seguro en la ducha y que las conteras están planas.
- Por favor utilice el taburete, si es necesario para sentarse y levantarse, lavarse y ducharse, si no puede mantenerse en pie adecuadamente.

Entrega

El taburete se entrega en una caja de cartón.

1 x asiento


4 x patas (telescópicas)

1 x asiento blando giratorio (solo en AD541)

1 x tornillo para el asiento giratorio (solo AD541)

Montaje

- Coloque el asiento del revés en una superficie plana.
- Coloque la parte blanca de las patas en los agujeros previstos para ello (colóquelas de manera que los agujeros queden en la parte interna del taburete) y encájela.
- Coloque las 4 patas y asegúrese que todas las patas están a la misma altura.

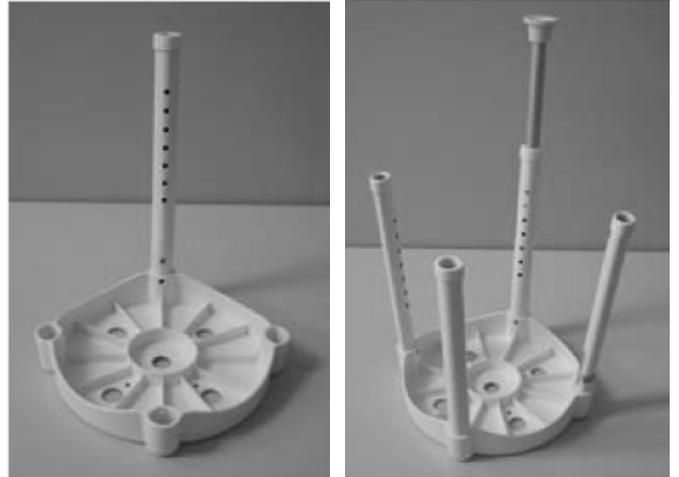

Colocar el asiento blando giratorio (AD541)

- Coloque el asiento blando giratorio en el medio del asiento y atorníllelo por debajo con el tornillo que se entrega.
- Para girar la superficie del asiento tire de las palancas laterales hacia arriba.
- Gire el asiento en la dirección deseada y suelte de nuevo las palancas laterales.
- A 90° de la posición inicial el asiento giratorio se detiene automáticamente.



Limpieza

La limpieza y desinfección debe realizarse regularmente (si cambia de usuario debe realizarse de manera obligatoria). Para limpiar utilice un jabón suave sin aditivos abrasivos. Para la desinfección puede utilizar productos habituales.

Mantenimiento

El taburete es libre de mantenimiento. Si el asiento presenta algún defecto contacte con su distribuidor para cambiarlo.

Garantía

El periodo de garantía es de 24 meses y cubre todos los defectos de los materiales o de fabricación.

Datos técnicos

Carga máx.	120kg
Peso	2,8kg (3,4kg con el asiento blando)
Superficie de asiento	320mm
Altura del asiento	470 – 640mm
AD541	Asiento giratorio, 360° (4x90° bloqueable)