

INSTRUCCIONES DE LAVADO
BABERO "PERMA-PRINT"

Paso	Tiempo	Temperatura	Nivel	Químicos (Para Lavadora 22 kg.)	Químicos (Para Lavadora 45 kg.)	pH	Análisis Volumétrico
Prelavado	2 min.	37° C	Alto				
Lavado con detergente	6-8 min.	62° C	Bajo	59-118 ml. detergente	118-237 ml. detergente	11.0-11.5	400-700 ppm.
Lejía opcional	8 min.	62° C	Bajo	15-59 ml. lejía al 10% ó 240 ml. al 1%	30-118 ml. lejía al 10% ó 480 ml. al 1%	10.2-10.8	130-150 ppm.
Aclarado	2 min.	62° C	Alto				
Aclarado	2 min.	52° C	Alto				
Aclarado	2 min.	42° C	Alto				
Aditivos/Suavizante	4 min.	37° C	Bajo	30-59 ml.	59-118 ml.	6.5-7.0	10-30 ppm.
Extracción	5-6 min.						
Secado*		Max. 65° C					

* Dejar un 3-5% humedad en el producto.